

血清アミロイド A(WHO)		2130100			
		担当部署			
hSAA		生化			
検査オーダー					
患者同意に関する要求事項		特記事項なし			
オーダーリング手順	1	電子カルテ→指示①→検査→*2.分野別→免疫・自己抗体→			
	2				
	3				
	4				
	5				
検査に影響する臨床情報		特記事項なし			
検査受付時間		8 : 15 ~ 16 : 00			
検体採取・搬送・保存					
患者の事前準備事項		特記事項なし			
検体採取の特別なタイミング		特記事項なし			
検体の種類	採取管名	内容物	採取量	単位	
1	全血	10 青	分離剤	8	mL
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
検体搬送条件		室温			
検体受入不可基準		1)採取容器違いの検体 2)バーコードラベルの貼られていない検体 3)固形物 4)粘性のある検体			
保管検体の保存期間		冷蔵・2 週間(追加検査については、検査室に要問合せ)			
検査結果・報告					

検査室の所在地	病院棟 3 階 中央検査部				
測定時間	当日中～翌日				
生物学的基準範囲	3 mg/L 以下 L Z テスト 栄研 hSAA 添付文書				
臨床判断値	設定なし				
基準値					単位
共通低値	共通高値	男性低値	男性高値	女性低値	女性高値
0	3	設定なし	設定なし	設定なし	設定なし
パニック値	高値	設定なし			
	低値	設定なし			
生理的変動要因	特記事項なし				
臨床的意義	<p>生体が炎症状態にあるか否かを判定する。SAA が明確な異常値を示せば、6-12 時間以前には炎症状態にあったことが確実となる。同じ目的で CRP が使われるが、両者は必ずしも同じ挙動を示すわけではなく、場合によっては両者の使い分け、併用が必要である。</p> <p>日本臨床第 7 版 1, 244,2009</p>				